

Handleiding verpakken histologie



Foto 1: Benodigdheden voor het verpakken van histologisch materiaal zijn:
Gelabeld buisje / potje
Absorptiemateriaal
Sealbag
Kartonnen inlay
Luchtkussen enveloppe of easy slider met door TNT vereiste bedrukking.



Foto 2: Voorzie het gelabelde buisje / potje van absorptiemateriaal .



Foto 3: Breng het geheel in een sealbag. Zorg daarbij voor een lekvrije sluiting / verpakking.



Foto 4: Vouw de kartonnen inlay om de sealbag.



Foto 5: Schuif de inlay met een los inzendformulier in een luchtkussenenveloppe of easy slider.

Voor optimale verwerking en beoordeling:

Indien insnijden van weefsel noodzakelijk is dan bij voorkeur vanaf de voor volledig van excisie, niet kritische zijde.

Weefsel ruim in de formaline brengen (alle zijden) voor goede fixatie en om beschadigen bij het verwijderen te voorkomen.